

## Difa® Ag Exulock technológián alapuló kötszerek

A Difa® Ag az Exulock technológián alapuló család (öntapadó és nem öntapadó változatban) antimikrobiális, nedvszívó, atraumatikus poliuretán habkötszer, amely egyenletesen elosztott, nagy nedvszívó kapacitású porral vagy extranedvszívó hátlapi réteggel.

Az Exulock technológiáján alapuló hab rendkívül nagy nedvszívó kapacitással rendelkezik, így a hab nagy hatékonysággal felszívja az összes váladékot, amikor érintkezik a sebváladékkal. Ezáltal egy lágy, összefüggő gélt képez, amely a habmátrixba ágyazódva egy kiváló váladékelvezető rendszert biztosít finom gélképződési folyamattal, amely lehetővé teszi a kötés könnyű eltávolítását.

A poliuretán hab vízálló, baktérium- és vírusálló poliuretán filmmel van laminálva, amely megakadályozza a külső fertőzések átjutását és a váladék szivárgását. A rendkívül légáteresztő fólia ezentúl nedves sebgyógyulási környezetet teremt.

Az ezüstionok jelenlétének köszönhetően a Difa® *Ag Exulock Family* széles spektrumú antimikrobiális hatású, amely segít csökkenteni a biofilmet a fertőzött sebekben, és antimikrobiális gátként szolgál a fertőzés vagy újrafertőződés magas kockázatának kitett sebekben.

### Rendeltetésszerű használat:

*Fertőzött vagy nagy fertőzésveszélynek kitett sebeknél, közepes vagy erős váladékozás mellett:*

- II. stádiumú nyomási fekélyek és III. stádiumú felszíni fekélyek.
- Részleges és teljes vastagságú diabéteszes lábfekélyek.
- Vénás elégtelenséggel járó lábszárfekélyek.
- Részleges és teljes vastagságú artériás fekélyek.
- Részleges vastagságú égési sérülések és horzsolások.
- Nyílt sebészeti sebek.
- Bőrszakadások.

A Difa® Ag C Sealed Edges és a Difa® Ag C Adhesive a kellemetlen szagú sebek kezelésére szolgálnak.

**Ellenjavallatok:**

- Nem alkalmazható a kötszer bármely összetevőjére való érzékenység esetén.
- Nem alkalmazható száraz sebekben vagy nekrotikus szövetekben.
- A Difa® Algal with Exulock technology nem javallott teljes vastagságú sebek, vérző sebek vagy harmadfokú égési sérülések kezelésére.
- Nem használható olyan sebekben, amelyek a csontokig vagy izmokig hatolnak.
- Nem használható oxidálószerekkel, mint például hipokloritoldatokkal vagy hidrogénperoxid-oldatokkal, mivel ezek lebonthatják a kötszer nedvszívó hidrocelluláris összetevőjét.

**Óvintézkedések:**

- A kötszer sterilitása nem garantált, ha a tasakot használat előtt felvágják vagy megsérül.
- A termék csak egyszer használatos a keresztfertőzés elkerülése érdekében.
- Ne használja a lejáratú idő után.
- Intolerancia esetén távolítsa el a kötést, és alaposan tisztítsa meg a területet.
- Ha a kötés eltávolítása során nehézségek merülnek fel, öblítse le steril vízzel vagy sóoldattal.
- A kezelés megkezdése előtt a seb és a beteg megfelelő értékelése szükséges.
- A sebet gyakran kell megvizsgálni. -
- Megfelelő támogató intézkedéseket ajánlott figyelembe venni (pl. antibiotikumok szedése fertőzés esetén)
- Kevés tapasztalat áll rendelkezésre újszülöttek, gyermekek és terhesség esetén.

## Használati útmutató:

- Tisztítsa meg a sebet
- Válasszon olyan kötest, amely elfedi a sebet, és 1 hüvelykkel kiterjed az egészséges szövetre.
- Vegye ki a steril kötszert a csomagolásból
- Szükség esetén a nem öntapadó kötszer méretre vágható
- A nem öntapadó kötszer felhelyezéséhez másodlagos filmkötést vagy elasztikus kötest kell használni a kötés rögzítésére
- Az öntapadó kötszer felhelyezéséhez először távolítsa el a védőfólia egy részét, hogy a kötés ragadós felülete szabadabbá váljon, majd helyezze a kívánt pozícióba, miközben eltávolítja a kötés második védőfóliáját. Óvatosan simítsa körbe a kötest, hogy biztosítsa a megfelelő tapadást a ragasztó és a seb körüli bőr között.


### Kötéscsere és eltávolítás:

- A kötéscsere gyakorisága a beteg állapotától és a sebváladék mennyiségétől függ. Cseréljen kötet, amikor elérte a maximális váladékkezelési kapacitást, vagy az egészségügyi szakember utasítása szerint.
- Az öntapadó kötés eltávolításához lazítsa meg a ragasztófilmm szélét, mielőtt a kötet leemelné a sebről.
- A nem öntapadó kötés eltávolításához óvatosan emelje fel a kötés sarkait a sebről.
- Tisztítsa meg a sebet, mielőtt új kötet helyezze fel.

**Sterilitás:**

ETO-val vagy GAMMA-val sterilizálva, kivéve, ha a csomagolás sérült vagy nyitott. Ne sterilizálja újra.

## Difa® Ag nem öntapadó változatok

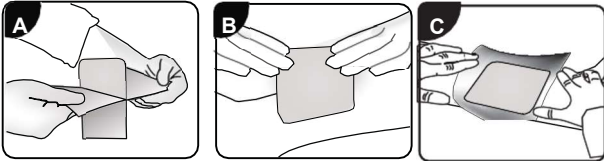

## Difa® Ag öntapadó változatok



1783

**Zadi Tibbi Gereçler San. Ve Tic. A.Ş**

IOSB Mah. Imsan sk. Imsan San. Sitesi B blok No:13

**Küçükçekmece/İstanbul/Turkey**

**Tel: +902124957303 Fax: +902124957304**

Email: [import@zaditibbigerecler.com](mailto:import@zaditibbigerecler.com)

**Visit our website**

 [www.zaditibbigerecler.com](http://www.zaditibbigerecler.com)